

GC GRADIA DIRECT

Composite photopolymérisable pour des restaurations invisibles



Une teinte de GC GRADIA DIRECT offre une superbe esthétique «invisible»

Sur la base de GC GRADIA, notre système de réalisation au Laboratoire de couronnes et bridges hautement esthétiques, GC GRADIA DIRECT est un composite qui présente une structure unique de particules et un système de teintes simple et astucieux. Disponible en version Antérieure et Postérieure, GC GRADIA DIRECT établit un nouveau standard d'esthétique «invisible» et de facilité d'utilisation, offrant un magnifique rendu naturel des restaurations avec seulement une teinte. Si une esthétique plus poussée est nécessaire, des teintes complémentaires peuvent aisément être ajoutées.




Gradia Direct a obtenu le score d'excellence de 5 sur 5 par le Dental Advisor et a été choisi comme "produit préféré" après 2 ans de succès clinique (Vol. 23 n°10, Déc. 2006). L'excellente esthétique obtenue avec Gradia Direct, sa capacité à se fondre à la structure environnante, ses incroyables propriétés de manipulation sans coller et la simplicité de son système de teintes ont été mis en avant par l'éditeur depuis sa première évaluation en 2004.



Le «Reality Product Guide» a également récompensé le GC Gradia Direct par 4 étoiles notifiant en particulier la simplicité de ses propriétés de manipulation.

GC GRADIA DIRECT présente la même structure diversifiée que celle de la dent naturelle. Leurs réflexivités et donc leurs propriétés optiques sont très similaires, permettant d'obtenir des restaurations esthétiquement «invisibles» - que l'on appelle «invizi-fx».

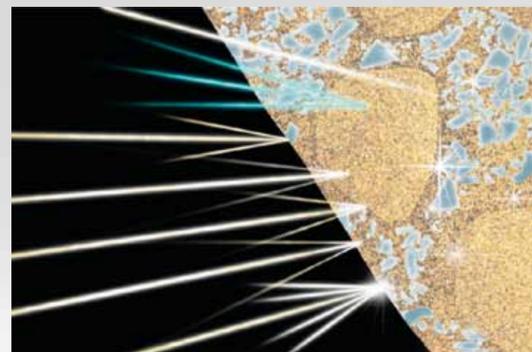

Un système de teintes unique pour une plus grande simplicité

Une restauration invisible nécessite une sélection correcte de la teinte ou de plusieurs teintes du GRADIA DIRECT. Pour aider au choix de la bonne couleur, saturation, luminosité et translucidité, il existe un système de teinte aussi ingénieux que simple. Ce dernier a été créé aussi bien pour la technique une seule teinte que pour celles à plusieurs teintes.



Teintes Standard

Pour la technique à une seule teinte, l'emploi d'une teinte unique standard donne un excellent résultat. Disponible en version Antérieure et Postérieure, chacune est un équilibre subtil entre la couleur, la saturation, la luminosité et la translucidité. La version Antérieure comprend les groupes de teintes A, B et C alignés sur le teintier VITAPAN Classical®, tout comme CV (Cervicale), XBW (Extra blanchiment) et BW (Blanchiment). La version «Postérieure» ne possède que le groupe A.



Exemple de restauration antérieure



Exemple de restauration postérieure

Teintes Spéciales «Outside»

Même si GC GRADIA DIRECT donne d'excellents résultats dans 95% des procédures où l'on utilise qu'une seule teinte, il peut arriver que la technique multi-teintes soit préférée comme dans le cas d'une restauration plus importante. Il existe deux types de teintes supplémentaires, appelées teintes spéciales que l'on place sous ou sur une teinte standard.

Teintes Spéciales «Inside»

Ce sont des teintes opaques qui sont placées sous une teinte standard pour réchauffer la teinte finale et bloquer le noir de la cavité buccale. Trois teintes Inside Special sont disponibles en version Anterior; AO2, AO3, AO4 et X-AO2 est proposée avec Gradia Direct X.



Exemple de restauration antérieure



Exemple de restauration postérieure

Teintes Spéciales «Outside»

Placées sur une teinte standard, ces teintes prennent en compte l'effet de l'âge sur l'émail en modifiant la translucidité et sa luminosité. Elles procurent un aspect plus «vital».

Dans la mesure où l'émail évolue d'une couche épaisse à mince en fonction de l'âge, sa luminosité diminue. Pour un enfant, la teinte WT (blanc translucide) est la plus blanche,


et la teinte DT (translucide foncée) est réservée aux dents d'adultes plus âgées on dispose de la teinte GT (gris translucide) qui donne la tonalité la plus «noire» et de la teinte CVT (cervicale translucide) pour la région cervicale.

Lorsque la couche d'émail s'amincit la translucidité de la dent augmente. Cela est particulièrement visible au


niveau incisal. Pour s'adapter au mieux à la translucidité de cette zone, la teinte CT (translucide claire) et/ou la teinte NT (naturelle translucide) peuvent être utilisées.

Toutes les teintes «Outside» sont disponibles pour la version Antérieure. Pour la version Postérieure on dispose des teintes WT, NT et X-WT pour Gradia Direct X.


Gradia Direct Antérieure 22 teintes

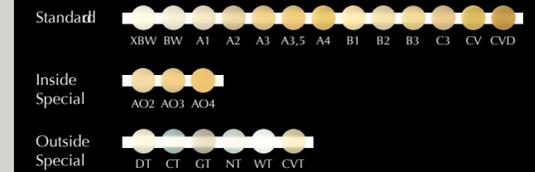

Gradia Direct Postérieure 6 teintes

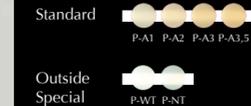

Gradia Direct X 6 teintes

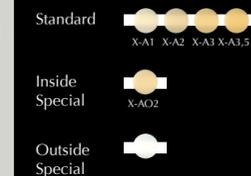

XBW: Extra blanchiment
BW: Blanchiment
CV: Cervicale
CVD: Cervicale foncée
DT: Translucide foncée
CT: Translucide claire
GT: Translucide grise
NT: Translucide naturelle
WT: Translucide blanche
CVT: Translucide cervicale

Teintes «Standard» et «Inside Special» basées sur le teintier Vita®.



Gradia Direct X

La dernière génération de Gradia Direct propose désormais plus de radioopacité avec la même manipulation et une esthétique superbe. Son très faible taux d'usure le rend idéal pour les restaurations postérieures. Gradia Direct X est disponible dans les principales teintes Standard, Inside et Special.



Teintier

La majorité des teintes est liée au teintier VITAPAN Classical® mais certaines sont particulières et pour en faciliter l'utilisation, il existe un teintier simple d'emploi.

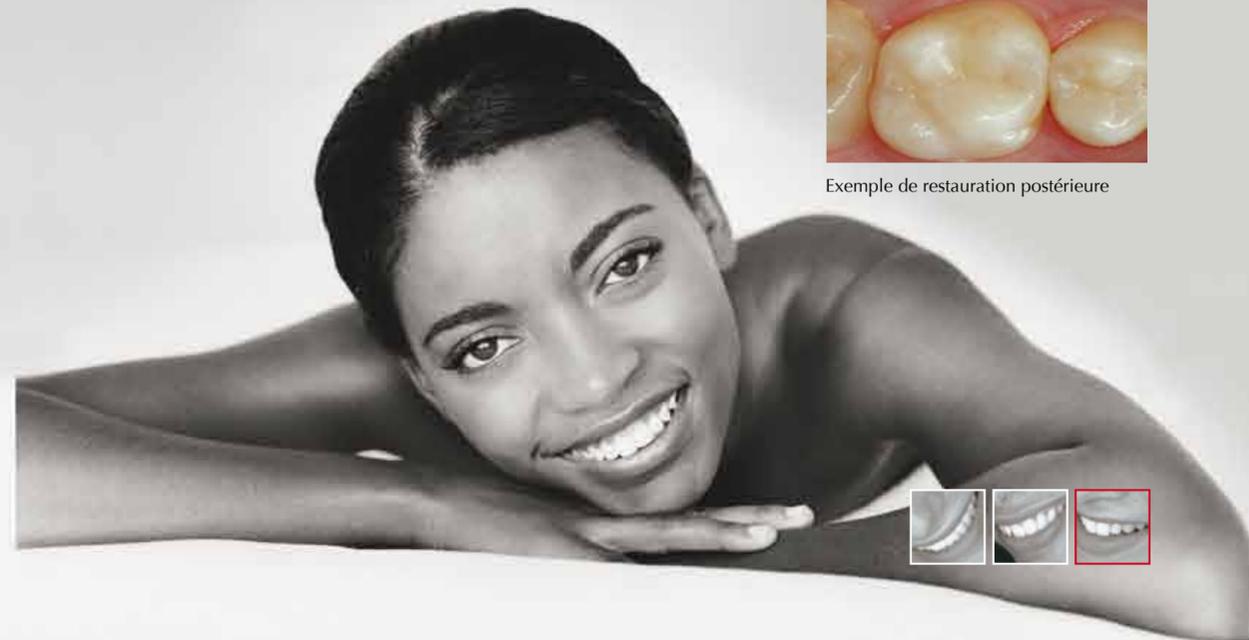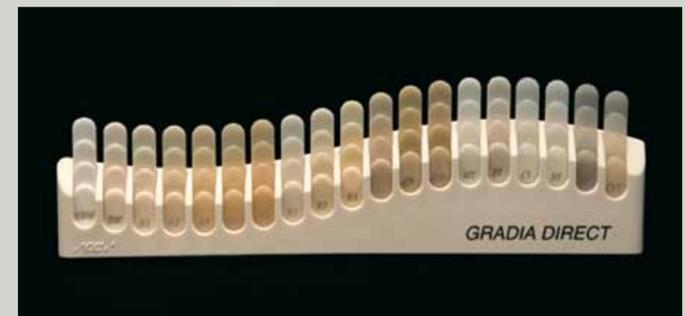

GUIDE DE RÉALISATIONS MULTI TEINTES

CLASSE I

Dr. N. Fares

CLASSE II

Dr. N. Fares

P-A1 P-A2 P-A3 P-A3.5
X-A1 X-A2 X-A3 X-A3.5
P-WT P-NT X-WT
X-AO2

STANDARD OUTSIDE INSIDE

CLASSE III

Dr. N. Fares

CLASSE IV

Dr. N. Fares

AO2 AO3 AO4 X-AO2
XBW BW A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3
DT CT GT NT WT

INSIDE STANDARD OUTSIDE

JUNIOR ADULTE SENIOR

CLASSE V

Dr. N. Fares

CV CVD
CVT
X-AO2

STANDARD OUTSIDE INSIDE



GC GRADIA DIRECT

SERINGUES

Coffret Complet:
26 Seringues de teintes Standard (sauf B1 et XBW), Inside Special et Outside Special et un teintier

Coffret Introduction:
7 seringues de:
A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 et un teintier

Recharge:
1 seringue dans chaque teinte

Note:

Contenu par unitip: 0.16 ml (0.24 g) pour antérieure et 0.16 ml (0.28 g) pour postérieure.
Contenu par seringue: 2.7 ml (4 g) pour antérieure et 2.7 ml (4.7 g) pour postérieure.

TEINTES ANTERIOR:

Standard: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, BW, XBW

Inside Special: AO2, AO3, AO4

Outside Special: NT, CT, DT, WT, GT, CVT

TEINTES POSTERIOR:

Standard: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5

Outside Special: P-WT, P-NT

TEINTES X:

Standard: X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5

Inside Special: X-AO2

Outside Special: X-WT

UNITIPS

Coffret Complet:

Toutes teintes Standard (sauf B1 et XBW), Inside Special et Outside Special et un teintier

Coffret Introduction: 5 Unitips de chaque : A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT et P-A2, et un teintier.

Recharges : 20 unitips de A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, DT, NT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-WT
10 Unitips: A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, XBW, BW, CT, WT, GT, CVT, X-AO2.

Accessoires:

Applicateur Unitip, teintier.

Le teintier VITAPAN Classical® et Vita® sont des marques déposées de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne.



GC G-BOND

Adhésif monocomposant automordançant photopolymérisable

CONDITIONNEMENT

Starter Kit :
Flacon de 5 ml, 50 applicateurs jetables, distributeur

Starter Kit UniDoses:

50 x 0.1 ml unidoses, 50 applicateurs jetables



GC GRADIA DIRECT FLO ET LOFLO

Composites hybrides fluides photopolymérisables

CONDITIONNEMENT

Recharges:
2 seringues de 1,5 g / 0.8 ml
4 embouts distributeurs de type aiguilles et 2 sachets protecteurs contre la lumière

Shade: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW

Accessoires:

GRADIA DIRECT FLO et LOFLO embouts distributeurs, type aiguille, 20 pcs
GRADIA DIRECT FLO et LOFLO embouts distributeurs, type plastique, 20 pcs

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240 NL - 3439 MN Nieuwegein
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC BENELUX B.V.
Edisonbaan 12
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
http://benelux.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.
9 bis, Avenue du Bouton d'Or
- BP 166
F - 94384 Bonneuil sur Marne Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.49.80.37.90
info@france.gceurope.com
http://france.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Bergstrasse 31
CH - 8890 Flums
Tel. + 41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com

GC

GC GRADIA DIRECT

Composite photopolymérisable pour des restaurations invisibles



La simplicité avec une seule teinte et l'invisibilité esthétique

GC